

スピリーバ®レスピマット®/スピオルト®レスピマット®を服薬されている患者様へ

スピリーバ®レスピマット®/スピオルト®レスピマット®の吸入方法

※7日間使用しなかった場合は、下に向けて1回噴霧した後に
使用してください。

吸入方法 01 回す



1 キャップを閉じた状態で
上向きに持ちます。

2 カチッと音がするまで本体
下部を180度回転させます。


吸入方法 02 開ける



3 横の小さな突起から
キャップを開けます。

4 息をゆっくり最後まで
吐き出します。

吸入方法 03 ゆっくり吸う

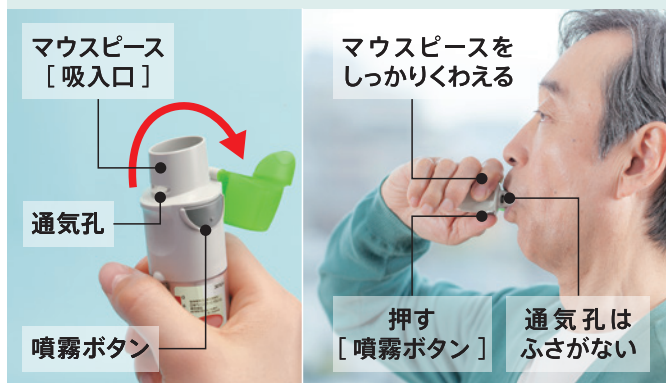

5 通気孔をふさがないように
気をつけながら、マウスピースを
しっかりとくわえます。

6 口からゆっくりと息を吸いながら
噴霧ボタンを押します。

7 ご自身の呼吸に合わせて
ゆっくりと吸い込みます。

8 マウスピースを口から外して、
苦しくない程度に、息を止めます。

9 息をゆっくりと吐き出して、
キャップを閉じます。

吸入方法 01-03 を1日1回、2吸入で完了です！

レスピマット®の使い方動画は検索や二次元コードからご覧いただけます。[60 秒]

https://www.copd-jp.com/howto_respimat/



新しいレスピマット®を使用開始する場合は、以下の準備をしてからご使用ください

※初めて使用する場合、または21日間使用しなかった場合、「吸入準備」の操作が必要になります。


使用前準備 01 組み立て



1 キャップを閉じた状態で安全止めを押しながら、透明ケースを外します。

2 カートリッジをまっすぐ挿入します。その際、カートリッジ上部のシールを突き破るので、抵抗感を感じます。

3 テーブルなどの平らなところに置き、ガチャと音がするまで奥に挿入します。

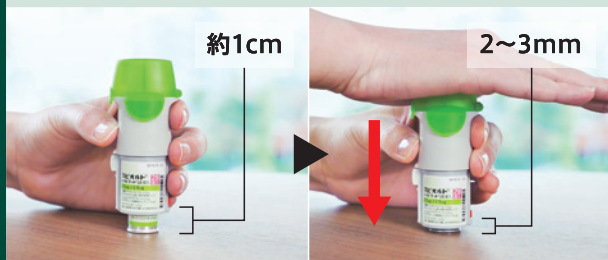

4 透明ケースを装着します。

使用前準備 02 吸入準備



5 キャップを閉じた状態で上向きに持ち、カチッと音がするまで本体下部を180度回転させます。

6 横の小さな突起からキャップを開け、下に向けて噴霧ボタンを押します。
※薬剤が目に入らないよう注意してください。

7 キャップを閉じます。

7日間以上使用しなかった場合は、下に向けて1回噴霧した後に使用してください。

21日間以上使用しなかった場合は、ミストが見えるまで5、6の操作を行った後、さらに3回操作を繰り返してください。

レスピマット®の組み立てと吸入準備の動画は検索や二次元コードからご覧いただけます。

https://www.copd-jp.com/howto_respimat/



COPD-jp レスピマットの使い方

検索



使用前準備 02 の操作で薬剤の噴霧が確認できたら、さらに
使用前準備 02 の操作を**3回**繰り返して吸入準備の完了です。

表面の吸入方法へ

複数本のレスピマット®を処方された場合には、2本目以降の使用開始時に、必ず**吸入準備**をしてください。



※テスト噴霧は、吸入可能な回数には含まれません。準備完了後60吸入で30日(60噴霧)、28吸入では14日(28噴霧)の吸入が可能です。